



БАКТЕРИЦИДНЫЕ
ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛИ
ВОЗДУХА



Защита от бактерий и вирусов с 1994 года



О компании

Производитель оборудования «Анти-Бакт» компания «СибЭст» основана в 1994 году и вот уже более 20 лет является одним из ведущих предприятий России в области производства и поставки ультрафиолетовых бактерицидных облучателей и рециркуляторов. Наши аппараты активно применяются в здравоохранении, предприятиях пищевой промышленности, салонах красоты, детских садах и школах, в домах и в офисах.

«СибЭст» производит, пожалуй, самый широкий ассортимент бактерицидных аппаратов как для обеззараживания воздуха и поверхностей в отсутствие людей (с открытым УФ-излучением), так и для обеззараживания воздуха в присутствии людей (с закрытым УФ-излучением). Большую популярность приобрели уникальные комбинированные модели - они сочетают преимущества как облучателей, так и рециркуляторов.

Мы не останавливаемся на достигнутом и совершенствуем сервис. Теперь вы можете бесплатно воспользоваться следующими услугами:

- Официальный расчет оборудования, подготовленный нашими специалистами, позволит без потерь вашего личного времени верно определить режимы работы и необходимое количество оборудования.
- Служба поддержки клиентов готова ответить на любые технические вопросы ваших сотрудников, проконсультировать по подбору бактерицидных ламп и правилам работы с бактерицидным оборудованием.



Вы всегда можете получить более подробную информацию и задать нам свои вопросы:

по телефону **(383) 303-41-63, вн. 700**
по эл. почте **info@antibact.ru**
на сайте **antibact.ru**

Облучатели

Общее описание

Назначение

Облучатели имеют открытые бактерицидные лампы, которые производят обработку с помощью ультрафиолета. Открытый ультрафиолет на сегодняшний день - самое эффективное решение для бактерицидной обработки воздуха и поверхностей в помещениях.

Области применения

- В помещениях с особыми требованиями к чистоте (например, в цехах по производству пищевых продуктов и на кухнях общественного питания).
- В помещениях, которые используются нерегулярно (например, в складских помещениях). В таком случае облучатель позволяет в короткие сроки (15-30 минут) провести обеззараживание помещения.

Правила пользования и режим работы

Облучатель подбирается в зависимости от размеров помещения и времени, в течение которого необходимо произвести обеззараживание. Желательно, чтобы время обработки помещения не превышало 30 минут, поскольку использование аппаратов в этом случае становится не слишком удобным - обработку помещения открытым ультрафиолетом необходимо повторять каждые 2 часа.

Персонал в строгом порядке должен быть ознакомлен с правилами техники безопасности при работе с бактерицидным оборудованием. Обработку помещения можно проводить только при отсутствии людей и животных, поскольку воздействие ультрафиолета негативно скажется на их организме.



Осторожно!
Ультрафиолетовое
излучение

При проведении обработки помещения необходимо предупредить возможных посетителей табличкой у входа в помещение. Также не стоит забывать, что открытый ультрафиолет представляет опасность и для растений, поэтому необходимо их оградить от прямого воздействия УФ-лучей.



Подбор облучателя

- Определите категорию помещения в таблице ниже.
- Выберите облучатель на стр. 4-5.
- В таблице подбора под выбранным облучателем определите время, необходимое для обработки вашего помещения.
- Несколько аппаратов дезинфицируют воздух быстрее и эффективнее, чем один. Поэтому используя, например, два аппарата, вы можете вдвое увеличить объем обрабатываемого воздуха или сократить время обработки.

Категория

Виды помещений

1-ая / 99%

Цеха по производству пищевых продуктов: колбас и колбасных изделий; мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов; молока и молочных продуктов, при открытом технологическом процессе; кондитерских изделий; по приготовлению заквасок; полуфабрикатов; пивобезалкогольной продукции; продуктов детского питания.

2-ая / 95%

Помещения фасовки готовых скоропортящихся продуктов.

3-ая / 90%

Помещения по переработке сырья; цеха по приготовлению горячих и холодных блюд; торговые залы предприятий общественного питания и торговли; мойки и хранения посуды и тары для консервирования; складские и бытовые помещения (с температурой воздуха не ниже 10 °С).

Облучатели

Модельный ряд

Анти-Бакт ОБС 2х30-150

Универсальный настенный облучатель. Оптимально подходит для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях производства и переработки пищевой продукции.

Особенность аппарата – экранированная верхняя лампа, при работе которой нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции. Это позволяет производить кратковременную обработку помещения в присутствии обученного персонала.

Высокое качество и надежная металлическая конструкция аппарата делают его «долгожителем», что позволяет минимизировать затраты на техническое обслуживание.

Характеристики

Значения

Исполнение корпуса	настенный
Количество ламп, шт	2
Мощность ламп, Вт	30
Производительность, м ³ /ч 99%	150
Мощность, ВА	185
Габариты, мм	955x123x118
Вес, кг	6,0



Кишечная палочка (E. Coli)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
40 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
80 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
120 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
160 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
250 м ³		100 мин.	60 мин.
400 м ³			

Сальмонелла (Salmonella Typhimurium)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
15 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
30 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
50 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
65 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
100 м ³		100 мин.	60 мин.
150 м ³			

Анти-Бакт ОБС 2х30-150 М1

Облучатель ОБС М1 незаменим для дезинфекции рабочих поверхностей. Конструкция облучателя позволяет направлять ультрафиолет на поверхности, нуждающиеся в особо качественной бактерицидной обработке.

Эта модель применяется для дезинфекции рабочей поверхности разделочного стола, а так же в лабораториях на пищевых предприятиях, где отсутствие бактерий – залог правильного результата исследований.

Характеристики

Значения

Исполнение корпуса	настенный
Количество ламп, шт	2
Мощность ламп, Вт	30
Производительность, м ³ /ч 99%	150
Мощность, ВА	185
Габариты, мм	1010x150x130
Вес, кг	7,0



Кишечная палочка (E. Coli)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
40 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
80 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
120 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
160 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
250 м ³		100 мин.	60 мин.
400 м ³			

Сальмонелла (Salmonella Typhimurium)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
15 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
30 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
50 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
65 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
100 м ³		100 мин.	60 мин.
150 м ³			

Облучатели

Модельный ряд

Анти-Бакт ОБС 2х30-150 М2

Потолочный облучатель Анти-Бакт ОБС М2 – оптимальное решение, когда планировка и оборудование не позволяют установить настенные аппараты, а так же когда необходимо повысить качество дезинфекции за счет расположения над рабочей поверхностью. Угол поворота аппарата на 270° позволяет направлять УФ-излучение на необходимые поверхности, что делает его удобным в эксплуатации.

Характеристики	Значения
Исполнение корпуса	потолочный
Количество ламп, шт	2
Мощность ламп, Вт	30
Производительность, м ³ /ч 99%	240
Мощность, ВА	185
Габариты, мм	1030x130x840
Вес, кг	6,0



Анти-Бакт ОБП 6х30-450

ОБП – мощный мобильный облучатель, эффективен при дезинфекции как воздуха, так и поверхностей. Оптимально подходит: в качестве передвижного варианта при проведении санитарных уборок; для больших помещений; для экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей; в качестве резервного аппарата.

Характеристики	Значения
Исполнение корпуса	передвижной
Количество ламп, шт	6
Мощность ламп, Вт	30
Производительность, м ³ /ч 99%	825
Мощность, ВА	450
Габариты, мм	1065x585x405
Вес, кг	18



Кишечная палочка (E. Coli)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
60 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
125 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
190 м ³	60 мин.	40 мин.	35 мин.
250 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
400 м ³		100 мин.	60 мин.
650 м ³			

Сальмонелла (Salmonella Typhimurium)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
25 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
50 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
80 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
100 м ³	100 мин.	60 мин.	35 мин.
160 м ³		100 мин.	60 мин.
250 м ³			

Кишечная палочка (E. Coli)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	6 мин.
210 м ³	30 мин.	20 мин.	12 мин.
440 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
660 м ³	60 мин.	40 мин.	35 мин.
880 м ³	100 мин.	60 мин.	40 мин.
1350 м ³		100 мин.	60 мин.
2300 м ³			

Сальмонелла (Salmonella Typhimurium)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	15 мин.	10 мин.	7 мин.
85 м ³	30 мин.	20 мин.	13 мин.
180 м ³	45 мин.	30 мин.	20 мин.
270 м ³	60 мин.	40 мин.	25 мин.
360 м ³	90 мин.	60 мин.	40 мин.
560 м ³		100 мин.	60 мин.
850 м ³			

Рециркуляторы

Общее описание

Назначение и области применения

Рециркуляторы закрытого типа предназначены для дезинфекции воздуха в помещениях в присутствии людей. Они намного удобнее и безопаснее облучателей открытого типа, а металлический корпус защищает от повреждения ртутные лампы. Это делает рециркуляторы наиболее подходящими для оснащения пищевых производств и кухонь общественного питания. Для дезинфекции помещения достаточно просто включить аппарат.

Режим работы

Режим работы аппарата – непрерывный. Включение производится за час до начала работы – именно такое время требуется, чтоб обеззаразить воздух и достичь заданного уровня бактерицидной эффективности в помещении. Отключать аппарат необходимо только после окончания рабочей смены или, при необходимости, не отключать вовсе.

Подбор рециркулятора

В таблице подбора выберите соответствующую категорию и объем помещения, место пересечения этих показателей подскажет наиболее подходящую модель для вашего помещения.

Преимущества рециркуляторов Анти-Бакт

Уникальная вентиляционная решетка			Три способа крепления рециркулятора
Отражатели из алюминия и специальные лампы		Fe	Металлическая конструкция корпуса
Легок в эксплуатации и обслуживании			Пульт и система «Ресурс»
			Мощный вентилятор (на выходе)

Кишечная палочка (E. Coli)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20
35 м ³	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20
50 м ³	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 20
80 м ³	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 20
125 м ³	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 50
160 м ³	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 50
200 м ³	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 100
240 м ³	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100
320 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150
375 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150
480 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 150
620 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200
750 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200
830 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300
1250 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300

Сальмонелла (Salmonella Typhimurium)

	1-я категория	2-я категория	3-я категория
0 м ³	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20
15 м ³	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 20	Анти-Бакт 20
20 м ³	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 20
30 м ³	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 50	Анти-Бакт 50
50 м ³	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 50
65 м ³	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 100
100 м ³	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100	Анти-Бакт 100
130 м ³	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150	Анти-Бакт 100
150 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150
200 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200	Анти-Бакт 150
235 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200
300 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 200
470 м ³	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300	Анти-Бакт 300



Рециркуляторы

Модельный ряд



Анти-Бакт 20

Самый малый рециркулятор в линейке аппаратов Анти-Бакт. Подходит для помещений лабораторного типа.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	1 x 15
Производительность, м ³ /ч 99%	30
Мощность, ВА	100
Уровень шума, не более, Дб	40
Габариты (настенный вариант), мм	155x105x610
Вес (настенный вариант), кг	5,0

Анти-Бакт 50

Подходящий вариант для кухни, заведения общественного питания, цеха смешивания ингредиентов или небольшого склада.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	1 x 30
Производительность, м ³ /ч 99%	75
Мощность, ВА	100
Уровень шума, не более, Дб	40
Габариты (настенный вариант), мм	160x140x1080
Вес (настенный вариант), кг	8,0

Анти-Бакт 100

Предназначен для обеззараживания воздуха любого производственного цеха или помещения приема пищи.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	2 x 30
Производительность, м ³ /ч 99%	150
Мощность, ВА	200
Уровень шума, не более, Дб	41
Габариты (настенный вариант), мм	190x140x1080
Вес (настенный вариант), кг	10,0

Рециркуляторы

Модельный ряд



ПОТОЛОЧНЫЙ



передвижной

настенный



передвижной

настенный



передвижной

настенный

Анти-Бакт 150

Может быть использован на молочном, рыбном или мясном заводе. В комплектации с подвесами, подходит для любого помещения с высокими потолками.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	3 x 30
Производительность, м ³ /ч 99%	225
Мощность, ВА	300
Уровень шума, не более, Дб	45
Габариты (настенный вариант), мм	290x140x1080
Вес (настенный вариант), кг	14,0

Анти-Бакт 200

Популярная модель для пивоваренного завода. Вертикальное или горизонтальное крепление позволяет разместить аппарат с учетом расположения танков или кег.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	4 x 30
Производительность, м ³ /ч 99%	300
Мощность, ВА	400
Уровень шума, не более, Дб	45
Габариты (настенный вариант), мм	450x140x1080
Вес (настенный вариант), кг	20

Анти-Бакт 300

Модель для больших площадей. В частности применяется на птицефабриках или в помещениях для содержания животных.

Характеристики	Значения
Количество и мощность ламп, Вт	6 x 30
Производительность, м ³ /ч 99%	450
Мощность, ВА	600
Уровень шума, не более, Дб	45
Габариты (настенный вариант), мм	450x140x1080
Вес (настенный вариант), кг	22,0

Комбинированные аппараты



Облучатель

Рециркулятор

Комбинированный аппарат

Назначение и области применения

Универсальное решение, сочетающее в себе преимущества и возможности как облучателей, так и рециркуляторов.

Предназначены для использования в помещениях, где необходимо обеззараживать воздух в присутствии людей, а так же поверхности при проведении санитарных уборок и подготовки помещения в отсутствии людей.

Режим и принцип работы

Уникальная запатентованная конструкция позволяет использовать комбинированный аппарат в двух режимах: как облучатель (Режим 1) либо как рециркулятор (Режим 2).

Особенность комбинированного рециркулятора – открывающаяся дверца. При закрытой дверце (Режим 2) работа аппарата аналогична работе рециркулятора – его можно использовать в течение всего рабочего дня в присутствии людей. Режим облучателя (Режим 1) позволяет производить обработку не только воздуха, но и поверхностей. Для этого достаточно открыть специальную дверцу ключом.

Аппараты Антикор

из нержавеющей стали



Особенности аппаратов Антикор

Корпус аппарата изготовлен из коррозионностойкой стали и оптимально подходит для обеззараживания помещений с высокой влажностью (до 95%) и агрессивной средой. Использование нержавеющей стали в обшивке корпуса повышает срок службы аппарата и обеспечивает эффективную защиту от воздействия бактерий и грибов.

Бактерицидные аппараты линейки Анти-Бакт Антикор имеют гладкую зеркальную поверхность, что позволяет осуществлять эффективный контроль за санитарным состоянием конструкции и в случае необходимости легко удалять загрязнения.

Модельный ряд
комбинированных
аппаратов **Анти-Бакт**

100 КС

150КС

200 КС

300КС

Модельный ряд
аппаратов

Анти-Бакт
антикор

150

200

300

Блок обеззараживания воздуха

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Описание

Блок обеззараживания воздуха предназначен для обеззараживания поступающего через приточную вентиляцию воздуха в помещения пищевой промышленности (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.).

Использование бактерицидного блока в составе системы вентиляции – это:

- Снижение уровня обсемененности в соответствии с рекомендациями СанПиН.
- Удобная эксплуатация за счет мобильного (выдвигаемого) лампового модуля. Для обслуживания и замены ламп достаточно достать выдвигаемый модуль.
- Удобно встраиваемый в общую систему вентиляции модуль
- Высокий ресурс ламп – до 16 000 часов
- Безопасная эксплуатация за счёт амальгамных ламп (ртуть находится в твердом состоянии)



Технические характеристики БОВ

Источник излучения: лампа бактерицидная амальгамная LightTech GRHNA 843 T6L 172/54	3 шт
Электрическая мощность / бактерицидный поток, Вт	172 / 54
Средняя продолжительность горения (ресурс), ч	16000
Содержание озона в воздушной среде, мг/м ³ , не более	0,03
Напряжение электропитания, В 220	± 10%
Частота переменного тока, Гц	50
Потребляемая мощность, ВА, не более	516 Вт
Производительность обеззараживателя при бактерицидной эффективности 99,9%, м ³ /ч, не менее	2500
Класс электробезопасности и степень защиты	класс 1, тип В
Средний срок службы, лет, не менее	5
Габаритные размеры, мм, не более	400x610x975
Размеры сечения, мм	900x600
Масса, кг, не более	30,0
Материал корпуса - металл с полимерным покрытием	Наличие

Патрон с повышенной влагозащитой



Специальный патрон с повышенной влагоустойчивостью обеспечивает бесперебойную работу бактерицидного оборудования в условиях повышенной влажности. Оптимально подходит для использования в цехах по производству пищевых продуктов и на кухнях общественного питания. Полностью соответствует требованиям ТУ 9444-001-23550507-2008, ГОСТ Р 50444-92.

Комплектация аппаратов Анти-Бакт патронами с повышенной влагозащитой

- Вся линейка аппаратов, кроме Анти-Бакт ОБП 6x30-450 и Анти-Бакт 20
- Все аппараты Анти-Бакт линейки Антикор комплектуются по умолчанию.

Лампы с тефлоновым покрытием



Возможна комплектация аппаратов бактерицидными лампами в защитной тефлоновой пленке. В случае разрушения стеклянной колбы лампы не происходит распространения осколков и ртути за пределы фиксирующей пленки. Это позволяет избежать незапланированной остановки производства и сохранять целыми партии готовой продукции.

Комплектация аппаратов Анти-Бакт лампами с тефлоновой защитой

- Возможна установка на любой аппарат линейки Анти-Бакт



Система «Ресурс» и пульт ИВН-1

Система «Ресурс»

Производит автоматический контроль времени наработки бактерицидных ламп в составе рециркуляторов.

- а) Зеленый индикатор
● сообщает, что лампа работает в нормальном режиме.
- б) Красный индикатор и звуковой сигнал сообщают, что срок использования лампы истек и ее необходимо заменить.



Пульт ИВН-1



Прорыв в контроле за временем наработки бактерицидных ламп!

Беспроводной пульт ИВН-1 позволяет получать информацию о времени наработки ламп из любой точки помещения. Для этого необходимо привести пульт на аппарат и нажать поиск – серийный номер счетчика и информация об обработанном лампами времени автоматически высветятся на дисплее.

Пульт ИВН-1 подходит ко всем аппаратам, оснащенным системой «Ресурс».

Преимущества использования



Экономия средств

Покупая аппараты Анти-Бакт с системой «Ресурс» и пультом ИВН-1, вы не переплачиваете за визуальные индикаторы, установленные на каждом аналогичном аппарате.



Экономия сил

Больше не потребуется подниматься к каждому аппарату, чтоб узнать показания счетчиков – универсальный пульт снимает показания на расстоянии до 3-х метров.



Экономия времени

Каждый рециркулятор имеет свой порядковый номер счетчика, поэтому необходимость наносить идентификационный номер и каждый раз переписывать его при снятии информации отпадает.

**до 10 лет
хранения данных**

Сохранность данных

Если аппарат не использовался долгое время и был отключен от питания, система «Ресурс» сохранит данные о наработанном лампами времени в течение 10 лет!

Бактерицидные лампы

Описание и характеристики



 ISO 9001:2000

Характеристики	СибЭСТ LTC 15T8	СибЭСТ LTC 30T8
Мощность, Вт	15	30
Цоколь	G13	G13
Длина, мм	436,2	893,4
Диаметр, мм	25,7	25,7
Сила тока, мА	350	380
Напряжение, В	49	98
УФ-мощность мВт/см ² на волне 254 нм Вт	47 4,8	100 11,0
Срок службы, часов	9000	9000

Бактерицидные лампы «СибЭст» производятся на современном заводе компании LightTech Ltd. Холдинг Light Sources, Inc (США) был основан в 1983 г. и стал лидирующим производителем бактерицидных ламп в мире.

В 1993 г. для удовлетворения постоянно растущего спроса на рынках Европы и Азии на бактерицидные лампы в Венгрии был построен завод LightTech Ltd. С 2009 года Компания LightTech Ltd производит бактерицидные лампы «СибЭст» в соответствии с мировыми стандартами, опираясь на огромный опыт в области производства газоразрядных ртутных ламп низкого давления и современный машинный парк.



Двойной контроль качества

В процессе производства определенное количество ламп проходит тест на соответствие техническим характеристикам. Для бактерицидных ламп «СибЭст» тестовая партия увеличена вдвое, что гарантирует высочайшее качество ламп.



Срок службы

Увеличенный до 9000 часов срок службы бактерицидных ламп «СибЭст» позволяет сэкономить до 12,5% бюджета на замену ламп.

100% отсутствие озона

Увioletовое стекло собственного производства LightTech для бактерицидных ламп «СибЭст» соответствует самым строгим технологическим стандартам. Максимальный КПД в диапазоне короткой волны 254 нм излучения УФ-С и полная фильтрация озonoобразующего спектра длиной 185 нм.

Стандартные типы ламп на 30 и 15 Вт

Все размеры и технические характеристики ламп соответствуют аналогам, что позволяет использовать их в любом оборудовании, где требуется замена бактерицидной лампы.

Серия «Green» – экологически безопасные бактерицидные лампы



Содержание ртути всего 4 мг

В отличие от обычных бактерицидных ламп, содержание ртути в которых достигает 10 мг, в лампах серии «Green» количество ртути снижено до 4 мг.



Амальгированная ртуть

В серии «Green» вместо обычной ртути используется амальгама. Благодаря этому в свободном состоянии собирается в pellets (шарики), которые легко утилизировать.

Документы

Документы

- Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники
(Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития)
- Регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения № ФСР 2010/06625, № ФСР 2010/06626, № ФСР 208/02422
(Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития)
- Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов ГОСТ Р № 0664227, № 0664228, № 0488424, № 0611993, №1415316
(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии)
- №1415316
(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии)
- Информационное письмо о возможностях использования УФ бактерицидных облучателей ООО «СибЭст» для инактивации вируса гриппа H5 серогруппы и обеззараживания помещений от вируса «птичьего гриппа» H5N1
(Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития по результатам испытаний)
- Заключение о возможностях использования УФ бактерицидных облучателей типа «АнтиБакт» и бактерицидного облучателя закрытого типа (рециркулятора) для инактивации вируса гриппа H2-субтипа и обеззараживания помещений от вируса гриппа H1N1
(ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора)
- Справка. Оценка эффективности применения серийно выпускаемых бактерицидных облучателей-рециркуляторов производства ООО «СИБЭСТ» для обеззараживания воздуха в производственных помещениях
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»)

Испытания и исследования

- Протокол лабораторных испытаний №157 от 19.04.2010
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» Испытательный Лабораторный центр)
- Протокол испытаний облучателя-рециркулятора бактерицидного ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» на влагоустойчивость
(Испытательный центр ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина»)
- Информационное письмо о возможностях использования облучателей-рециркуляторов ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» для обеззараживания воздуха от микобактерий - возбудителей туберкулеза
(Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза)

Нормативные документы

предписывающие использование бактерицидного ультрафиолетового излучения

- Производство и реализация рыбной продукции СанПиН № 2.3.4.050-96.2.3.4
- Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий СанПиН № 2.3.4.545-96.2.3.4
- Производство молока и молочных продуктов СанПиН 2.3.4.551-96
- Предприятия пивоваренной и безалкогольной промышленности СанПиН № 3244-85
- Производство, хранение и перевозка сырья и продуктов животного происхождения СанПиН № 13-5-02/0536



630049, Новосибирск
Красный проспект, 220 корп. 52
(383) 303-41-63, вн. 700
info@antibact.ru
antibact.ru